

DISTRIBUITO in ITALIA da:

Allmobility trading S.r.l.

Via Giacomo Balla, 4

42124 REGGIO EMILIA (RE)

Tel. 0522/1753185

info@allmobility.it

www.allmobility.it

Un marchio di:

ROTH Sanitärprogramme GmbH

Kohlbergstraße 5

D-72213 Altensteig




Tel +49 (0)7453/9381-0 Fax -23

info@mobeli.de

www.mobeli.de



Maniglione mobile con ventose e indicatore di sicurezza

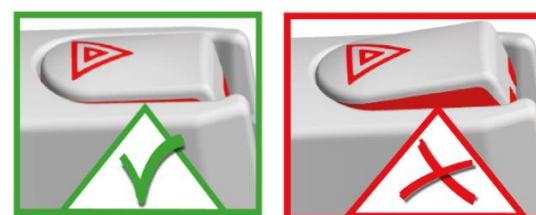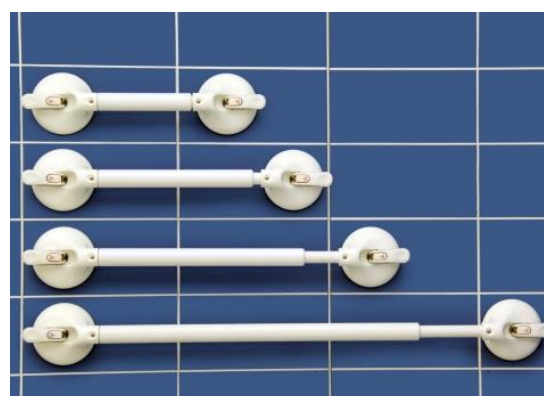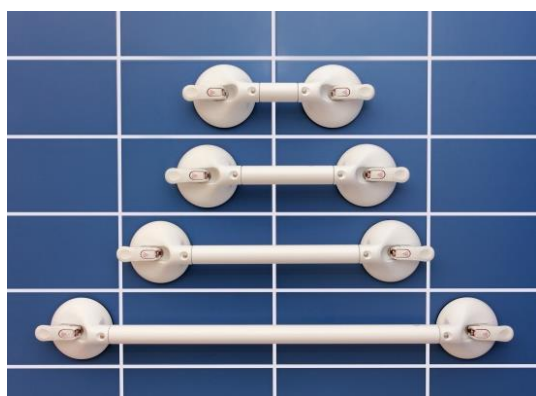

**Manuale d'istruzioni
Maniglioni mobili**



Codici Produttore

14002 21S	14002 20S
14002 22S	14002 25S
14002 23S	14002 26S
14002 24S	14002 27S
	14002 26S/SCL
	14002 27S/SCL

Codici Distributore

ALL08 B	ALL08 E
ALL08 C	ALL08 02-25
ALL08 D	ALL08 G
ALL08 H	ALL08 52-07
	ALL08CHROM G
	ALL08CHROM 52-07

Indice

1. Informazioni generali	2
1.1 Informazioni generali	2
1.2 Spiegazioni / simboli nel manuale e sul maniglione	3
1.3 Uso previsto	3
1.4 Campo di applicazione del prodotto	3
1.5 Per vostra informazione	3
1.6 Garanzia	4
1.7 Riutilizzo	4
2. Informazioni sulla sicurezza	4
3. Operazioni Montaggio	5
3.1 Montaggio	5
3.2 Fissaggio / Aspirazione	5
3.3 Rilascio	5
3.4 Smontaggio	5
4. Dati tecnici	6
4.1 Marcature sul prodotto	6
4.2 Tabella Dati tecnici	6
4.3 Materiali	6
5. Manutenzione	6
5.1 Manutenzione (pulizia/disinfezione)	6
5.2 Manutenzione (assistenza)	7
6. Riconoscere ed eliminare i malfunzionamenti	7
7. Smaltimento	7
8. Immagini	8
8.1 Immagini operazioni montaggio	8
8.2 Immagini operazioni smontaggio	9
8.3 Immagini del funzionamento dell'indicatore di sicurezza	10
9. Accessori	11
10. Altri prodotti	11

1. Informazioni generali

1.1 Informazioni generali



Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di seguire le istruzioni per garantire la vostra sicurezza durante l'utilizzo del maniglione mobile. Conservare queste istruzioni per l'uso per riferimento futuro e/o trasmissione ad altri utenti!

Si declina ogni responsabilità da parte del produttore e del distributore in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza indicate in queste istruzioni.

1.2 Spiegazioni / simboli presenti nel manuale e sul maniglione a ventosa

	Seguire le istruzioni per l'uso!
	Per le persone con disabilità visiva; questa guida si può trovare su Internet all'indirizzo https://www.mobeli.de/download-bereich la dimensione del carattere può essere impostata di conseguenza.
	Avvertenze (Indica una situazione di pericolo)
	Produttore (in aggiunta all'anno di fabbricazione del maniglione)
	Peso massimo utilizzatore
	Le maniglie mobili MOBELI sono conformi alla direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici di classe I
	Designazione del lotto



Avviso relativo alle allergie:

I dischi in gomma di alta qualità contengono lattice di gomma naturale.
Il lattice di gomma naturale può causare reazioni allergiche, compresi shock anafilattici.

1.3 Uso previsto



Come impugnatura o maniglia di supporto al sollevamento per adulti e bambini. I maniglioni mobili sono progettati per sostenere il movimento naturale. **Non sono progettati per sopportare l'intero peso corporeo.**

Non è consentito qualsiasi altro uso, ad esempio come sedile, maniglia per il trasporto o ausilio per l'arrampicata.

1.4 Campo di applicazione del prodotto

Il maniglione è destinato ad un uso libero in locali domestici come docce, vasche da bagno, servizi igienici e lavabi.

Affinché l'aspirazione sottovuoto generata dai dischi in gomma sia efficace, il maniglione può essere **fissato solo su superfici rigide, lisce e non porose, a prova di vapore, pulite, asciutte e prive di oli e grassi.**



Su superfici ruvide o porose, la forza adesiva e il tempo di aderenza sono ridotti o inesistenti. Si prega di ricordare che le piastrelle non sono necessariamente sempre lisce e a prova di vapore (cioè, adatte per la generazione del sottovuoto). **Prova le tue piastrelle e la parete prima dell'uso** (con l'aiuto di un assistente, se necessario).

Poiché le ventose sono realizzate in gomma naturale altamente adesiva, elastica e morbida, possono adattarsi a piastrelle leggermente ruvide (**ATTENZIONE!** In caso di tempo di presa ridotto fate attenzione all'indicatore di sicurezza).

Il maniglione mobile è ideato per un utilizzo domestico, dove mancano maniglie fisse, ad es. per usi temporanei dopo una degenza ospedaliera o per la verifica dello spazio abitativo. È indicata anche in ospedali/cliniche e case di cura per l'aggiunta di maniglie supplementari e di breve durata.

I maniglioni mobili possono essere anche utilizzati dove non è possibile montare maniglie fisse, ad es. in box doccia in vetro o in vasche da bagno. O nei casi in cui la perforazione delle pareti non è consentita (o non è possibile), ad esempio in un appartamento in affitto, o se nella parete possono essere presenti tubature idriche e/o cavi elettrici.

Il maniglione MOBELI è ideale anche per l'uso durante le visite dai medici, in ufficio, in viaggio ecc....

Inoltre, il maniglione a ventosa può essere utilizzato per determinare la posizione corretta di fissaggio delle maniglie fisse, ossia l'altezza del maniglione può essere determinata e verificata in modo ottimale prima dei lavori foratura/avvitamento.

1.5 Per vostra informazione

Negli hotel e negli edifici pubblici in Europa le piastrelle devono essere non porose, impermeabili e a prova di vapore (DIN/EN 159 e 176). Ai sensi della norma DIN EN 12004 (prima del 2001: DIN 18156) per le piastrelle adesive le colle devono avere un'aderenza minima di 0,5 N/mm². Per esempio con due piastrelle ciascuna di dimensioni 147 mm x 147 mm x 0,5 N/mm², risulterebbe una forza di aderenza approssimativamente di 2160 kg. Anche con una forza adesiva effettiva di un 1/3 della superficie della piastrella (dovuto a causa di un'applicazione non uniforme delle piastrelle) e senza posizionare il maniglione sulle fughe, ci sarebbe ancora una forza adesiva di approssimativamente 700 kg.

Purtroppo non sempre possiamo aspettarci queste condizioni, perciò è assolutamente **indispensabile testare la forza di aderenza sulle piastrelle o sulla superficie della parete.**

Inoltre a causa dell'invecchiamento del materiale, o per es delle costruzioni prefabbricate, la forza di aderenza può essere limitata, pertanto è necessario verificarla (ad esempio a causa del carico a scatti), eventualmente da parte di un assistente.

1.6 Garanzia

La Garanzia prevista è di sei anni (se usato quotidianamente come indicato) in un istituto o una struttura pubblica. La condizione preliminare è il rispetto delle norme di manutenzione e di sicurezza specificate nelle presenti istruzioni d'uso.

La durata effettiva può variare a seconda della frequenza e dell'intensità di utilizzo. Questi **maniglioni sono stati testati secondo la norma di sicurezza ISO 17966:2016.**

1.7 Riutilizzo

Il prodotto è adatto all'uso ripetuto. La durata/vita utile delle ventose dipende dal tipo di utilizzo. **Pulire e disinfettare accuratamente il prodotto prima del riutilizzo e controllare attentamente il maniglione**, in particolare il funzionamento dell'indicatore di sicurezza.

2. Informazioni sulla sicurezza



- **Prima di ogni utilizzo del maniglione mobile, è necessario osservare l'indicatore di sicurezza e agire secondo le istruzioni (vedi pagina 10)**



- **Anche su piastrelle completamente lisce, prive di pori, non è mai possibile determinare con precisione quando l'aderenza diminuirà (ad esempio a causa di crepe/fessure sottili), quindi osservate sempre l'indicatore di sicurezza.**

- Utilizzare il maniglione mobile solo se si ha esperienza nell'utilizzo o se si è sotto la supervisione di una persona che ha esperienza nell'utilizzo di questi ausili. I bambini possono utilizzare la maniglia solo sotto sorveglianza o se le leve sono fissate con un lucchetto per bloccaggio del maniglione (vedi accessori a pagina 11).

- Prima di ogni nuovo fissaggio, assicurarsi che il maniglione mobile funzioni correttamente.

Prestare particolare attenzione ai dischi in gomma.

I dischi devono essere puliti, non danneggiati e non devono presentare segni di lacerazione o incisione.

Non utilizzare mai maniglioni mobili con dischi di gomma danneggiati o con forza di aderenza limitata.



- Ricordate che la ventosa aderisce solo al supporto, quindi controllare l'adesione del supporto (ad es. la piastrella sulla parete) prima di utilizzarlo in un nuovo posto.

- Dopo la chiusura delle leve, la forza di aderenza generata dalle ventose può essere completamente o parzialmente assente; specialmente per piastrelle non smaltate, pietre naturali (ad esempio il marmo), legno e rivestimenti ceramici, che sono dotati di proprietà antiscivolo per struttura/smerigliatura o irruvidimento. Per i maniglioni con indicatore di sicurezza questo diventa visibile dal sollevamento della linguetta!



- **Attenzione!** In caso di utilizzo sott'acqua, la forza di aderenza si riduce.
- La forza di aderenza indicata si riferisce alle normali temperature ambiente (10°-30° C), ad alte temperature, ad es. in sauna la forza di aderenza diminuisce. **Attenzione!** In caso di temperature superiori a 41° C (che possono essere raggiunte durante l'esposizione alla radiazione solare o col contatto con l'acqua calda) l'utilizzo del maniglione potrebbe causare danni alla pelle e/o bruciature.

- L'aderenza indicata si riferisce ad un'altitudine di circa 300 m s.l.m., ad altitudini superiori si riduce (circa del 10 % ogni 1000 m di altitudine).

- Non esporre mai i dischi di gomma alle radiazioni UV (luce solare) per periodi di tempo prolungati; altrimenti perderanno rapidamente la loro elasticità. Per questo motivo, non collegare mai le maniglie a qualsiasi superficie (ad es. finestra) che verrà illuminata dall'esterno.



- Non collocare sotto il maniglione nulla che possa essere danneggiato da una sua caduta improvvisa, né rimuovere il maniglione dopo ogni utilizzo.

- **I maniglioni mobili possono essere utilizzati solo con chiusure correttamente inserite.**

- Non fissare i maniglioni mobili su lamiere di veicoli, lamine o vetri sottili, poiché la pressione creata dall'aspirazione della ventosa può danneggiare questi materiali.

- Se il maniglione mobile viene utilizzato ininterrottamente per un periodo di tempo più lungo di quello consigliato, c'è il rischio che possa lasciare sulla superficie (ad es. vasca da bagno) aloni in modo permanente del disco di gomma.



- **ATTENZIONE!** Non combinare mai i prodotti MOBELI con parti di altri produttori. In questo caso decade ogni garanzia e responsabilità.

3. Operazioni Montaggio

3.1 Montaggio (vedi pagina 9)

Assemblaggio: Inserire i perni a scatto su entrambi i lati della barra telescopica (fig. 11) e inserire la barra nel corpo della ventosa fino a quando i perni a scatto si bloccano in posizione nei loro fori corrispondenti (suono "clic").



Verificare la tenuta sicura di tutti i componenti provandoli!

Il maniglione non deve essere utilizzato se le chiusure non sono innestate su entrambi i lati.

3.2 Fissaggio/Aspirazione (vedi pagine 8 e 10)

1. Esaminare le ventose e la superficie dei dischi che devono essere fissati.
2. **Pulire accuratamente la superficie del supporto** (fig. 1) in modo che sia **pulita** (ad es. da fanghi di calce acidificati) e **priva di grasso**. Nello stesso modo **anche la superficie del disco deve essere pulita**.
3. **Premere con forza il maniglione mobile contro la superficie (parete, piastrelle)**. (fig. da 3 a 5).
 - a. Le **leve con le ventose** devono essere **spinte verso la superficie**
 - b. Controllare con cura che entrambi i dischi in **gomma** siano sempre posizionati con tutta l'area della ventosa su piastrelle o altre superfici in modo che non ci siano fughe (fig. 8 e 9) sotto il disco in gomma e che i dischi siano montati almeno 10 mm sopra il bordo inferiore della piastrella (fig. 2). Con l'impugnatura telescopica (codice d'ordine. Nr.14002-21S/ALL08 B,-22S/ALL08 C,-23S/ALL08 D,-24S/ALL08 M) è possibile regolare la lunghezza del maniglione (fig. 6 e 7).
4. **Premendo il maniglione e le leve contro la superficie da aspirare**, ruotare la prima leva e poi la seconda leva (fig. 2,3,4,4,5,7).
5. Gli indicatori di sicurezza controllano continuamente lo stato dell'aderenza delle ventose.



Dopo aver premuto e ruotato le leve, entrambi gli indicatori di sicurezza delle leve devono essere completamente abbassati (pagina 10, fig. 13 e 15)! Nel corso del tempo, quando l'aderenza diminuisce, le leve di sicurezza si estendono.

- Se si vede un fianco rosso delle leve di sicurezza (fig. 14 e 16), il maniglione non deve più essere utilizzato e **deve** essere staccato e **riattaccato** immediatamente!
- Più è visibile il fianco rosso della leva (fig. 14 e 16), **minore è l'aderenza effettiva!**



6. **Controllare l'indicatore di sicurezza prima di ogni utilizzo**. Ciò può essere percepito da persone ipovedenti o non vedenti. Se questa non è abbassata (come descritto sopra), rimontare i maniglioni a ventosa. Se le leve sporgono dall'indicatore di sicurezza ancora dopo averle spostate, e rimangono sporgenti anche dopo averle premute, la maniglia deve essere staccata e riattaccata (vedere Guasti a pagina 7).



Se non si ottiene l'abbassamento della leva, non utilizzare mai la maniglia!

3.3 Rilascio

1. Posizionare un dito sotto la leva per sollevarla; al tempo stesso posizionare il pollice sull'incavo della leva per evitare un effetto di rinculo.
2. **Attenzione: in caso di utilizzo scorretto c'è il rischio di schiacciamento.**
3. Un po' d'attesa! I dischi di gomma si rilassano dopo circa 30-60 secondi per tornare alla loro forma originale. Ora la ventosa può essere rimossa dalla parete. Se i dischi di gomma continuano ad aderire, si possono anche sollevare questi ultimi su un lato (tra la parete e il disco di gomma) con un dito in modo che l'aria possa passare sotto di essi.
4. **Non tentare di allentare la rondella di gomma con oggetti o utensili a spigoli vivi; si rischia di danneggiarla.**
5. Quando non in uso, riporre la maniglia mobile con i dischi di gomma rilassati (con leve disinserite), e piatti. Proteggere il maniglione mobile (ad es. in un cartone/scatola) dai raggi UV.



3.4 Smontaggio (vedi pagina 9)

Smontaggio: spingere i perni a scatto (fig. 10), e mentre si tiene la ventosa tirare la barra fuori da essa (fig.11). Conservare le ventose con le leve di inclinazione rivolte verso l'alto su una superficie piana (Pagina 9 fig. 12)

4. Dati tecnici

4.1 Marchi sul prodotto (Per le spiegazioni dei simboli, vedere pagina 2)

Dietro l'impugnatura (C)



ROTH GmbH D-72213 Altensteig Jahr

MOBELI.de



140022XS





XX

Nella parte superiore dell'impugnatura (D)



max. XX kg

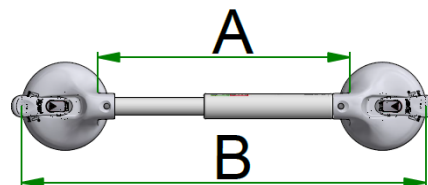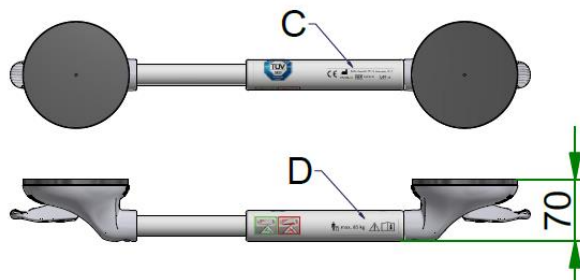

Attenzione! Portata Massima dei maniglioni da rispettare riportata nella tabella Dati tecnici e sull'impugnatura.



I maniglioni mobili sono progettati per sostenere il movimento naturale. Non sono progettati per sopportare l'intero peso corporeo.

4.2 Tabella Dati tecnici

Codice ROTH	Codice AllMobility	Lunghezza maniglione A (regolabile con impugnature telescopiche) in mm	Lunghezza totale B in mm	Ø maniglia in mm	 Max. Peso utente in kg	Peso del prodotto in kg
14002 20S	ALL08 E	110.	330.	35.	105	0,76
14002 21S	ALL08 B	220-345	440-565	35/24	85	0,89
14002 22S	ALL08 C	340-465	560-685	35/24	85	1,02
14002 23S	ALL08 D	440-565	660-785	35/24	85	1,13
14002 24S	ALL08 H	665-790	885-1010	35/24	80	1,37
14002 25S	ALL08 02-25	210	430	35	100	0,85
14002 26S	ALL08 G	350	570	35	95	1,01
14002 27S	ALL08 52-07	650	870	35	95	1,33
14002 26S/SCL	ALL08CHROM G	350	570	35	95	1,01
14002 27S/SCL	ALL08CHROM 52-07	650	870	35	95	1,33

4.3 Materiali

Manubrio in PVC antiurto, tutte le parti metalliche in acciaio inossidabile
Disco ventosa in NBR, corpo della ventosa in PA 6.6

5. Manutenzione

5.1 Manutenzione (pulizia/disinfezione)

- Pulire il maniglione con un panno utilizzando detersivi domestici, come acqua e sapone, ma **non utilizzare detersivi abrasivi o con agenti aggressivi**. Non utilizzare solventi o benzina e non utilizzare detersivi che attaccano la plastica.
- Risciacquare accuratamente il manico con acqua tiepida fino a quando tutti i residui di sapone e schiuma sono stati rimossi (In caso contrario la ruggine può aderire alle parti in acciaio inossidabile).

- Tenere sempre i dischi di gomma liberi da olio, polvere e sporcizia sciacquandoli con acqua calda e asciugandoli con un panno privo di lanugine.
- Una pulizia di base dei dischi in gomma con il nostro speciale detergente (Best. No. 1400677) o isopropanolo, aumenta l'effetto di aspirazione ed è consigliato a intervalli più lunghi. Dipende dalla frequenza d'uso e dalle modalità di utilizzo, ad esempio dopo l'utilizzo di additivi per bagno oleosi.
Utilizzare questi detergenti solo sui dischi di gomma, non sulle parti in plastica.
- Disinfettare il prodotto pulendo tutte le superfici con un panno e del disinfettante.
- In ambiente medico, prendere nota anche delle "Raccomandazioni della Commissione per l'igiene ospedaliera e la prevenzione delle infezioni".
- Il manico è resistente ai principi attivi dei disinfettanti per mani e superfici certificati dalla DGHM (Disinfectant Commission of the German Society for Hygiene and Microbiology), ad eccezione di etere fenolo, e derivati piridina e tiocianato.
- **Per i dischi di gomma può essere utilizzata solo la disinfezione con alcol.**



5.2 Manutenzione (assistenza)

- Se il maniglione viene fissato alla parete per un periodo di tempo lungo, i dischi di gomma si dilatano/deformano eccessivamente. Per questo motivo si consiglia di rimuovere il maniglione dalla parete ogni 14 giorni circa e di lasciarlo riposare per una notte su una superficie piana con i dischi di gomma rilassati. Riattaccare la mattina dopo.
- Controllare regolarmente i dischi in gomma per eventuali limitazioni funzionali dovute alla ridotta elasticità, all'invecchiamento, all'usura, alla luce solare, alla conservazione scorretta, a incisioni/tagli, ecc. In caso di dischi in gomma danneggiati con aderenza limitata, le ventose complete (ricambio n. 14002S) o i dischi in gomma devono essere sostituiti (n. 1402721) da personale specializzato.
- Tenere sempre l'indicatore di sicurezza libero da sporcizia!
- **Controllare regolarmente che il maniglione non sia danneggiato e non utilizzare in caso di danneggiamento.**



6. Riconoscere ed eliminare i malfunzionamenti

Malfunzionamenti	Possibili cause di errore/test	Rettifica
Con maniglione nuovo: l'indicatore di sicurezza si apre dopo un breve periodo di tempo	Calce o altra sporcizia sulla superficie.	Pulire accuratamente la superficie.
	La superficie non è a priva di pori, anche se appare liscia o è danneggiata (es. fessurazione capillare/crepe sottili nella piastrella). Possibilità di test: Fissare il maniglione a una lastra di vetro o a uno specchio e osservare l'indicatore. Se l'indicatore non è più attivo, l'errore è dovuto alla superficie.	Se possibile, fissare il maniglione in un'altra posizione con una base priva di pori. Se ciò non è possibile, è possibile incollare piastre autoadesive in acciaio inox (codice 1461414/ ALL08 412) sulle quali possono essere fissati i maniglioni. Vedere accessori disponibili.
Con maniglione già in uso: l'indicatore di sicurezza si apre dopo un breve periodo di tempo	Dischi in gomma graffiati o danneggiati	In caso di danni, i dischi in gomma (n. ordine 1402721) possono essere sostituiti dal rivenditore specializzato oppure può essere sostituita la ventosa completa (n. ordine 14002S)
Indicatore di sicurezza della leva è ancora leggermente sollevato dopo il montaggio	1. Leva durante la manovra non fermamente premuta verso il basso!	Fissare di nuovo il maniglione e premere la leva con decisione. (Pagina 8 immagine 3 freccia 2)
	2. Il disco di gomma è troppo teso. Questo accade quando il maniglione è stato fissato alla parete per lungo tempo.	Conservare il maniglione per una notte su una superficie piana con le leve rivolte verso l'alto. (Pagina 9 fig. 12). Fissare di nuovo il giorno successivo, premere saldamente le leve verso il basso. Se la leva di montaggio sporge ancora dopo essere stata premuta, i dischi di gomma devono essere sostituiti dal rivenditore specializzato (codice 1402721) o la ventosa completa (codice 14002S) deve essere sostituita.

7. Smaltimento




L'imballaggio del prodotto può essere riciclato. Le parti metalliche vengono riciclate come scarti metallici. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge nazionali in materia. Per informazioni sulle aziende locali di smaltimento dei rifiuti si prega di contattare l'amministrazione comunale.

I Maniglioni mobili ROTH non devono essere esportati negli USA.

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

8. Immagini


8.1 Immagini operazioni montaggio

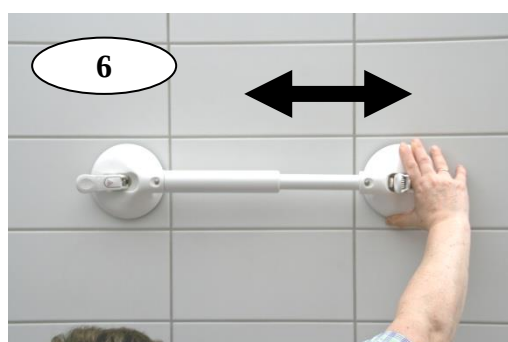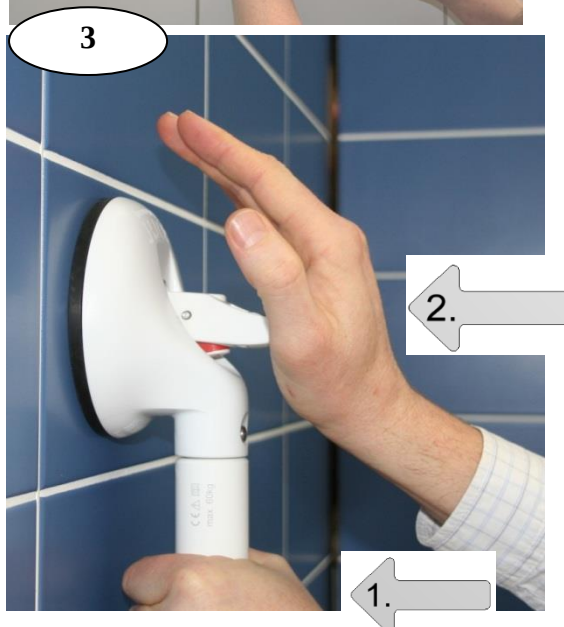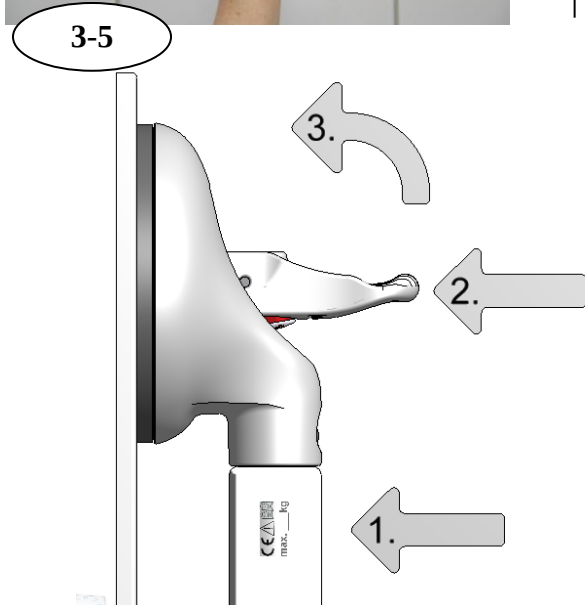

Codici produttore 1400221S; 1400222S; 1400223S; 1400224S

Codici distributore ALL08 B ; ALL08 C ; ALL08 D ; ALL08 H

8.2 Immagini operazioni smontaggio

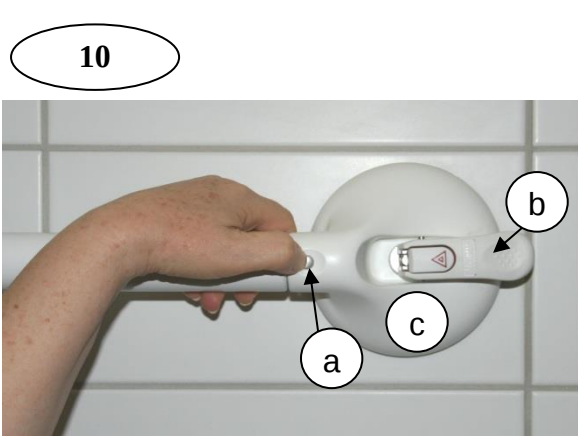


Indicatore di sicurezza sulla leva:

13



Esatto!

14

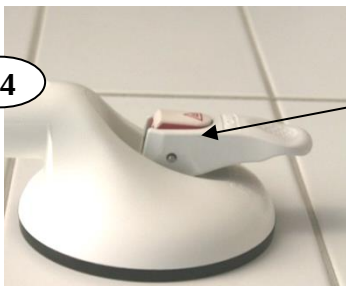

Forza di aderenza troppo bassa!


La ventosa deve essere immediatamente staccata e riattaccata.

Pericolo di incidente!

Modalità di funzionamento dell'indicatore di sicurezza: l'aderenza è monitorata in modo permanente.

Spiegazione dei simboli sui maniglioni:

15

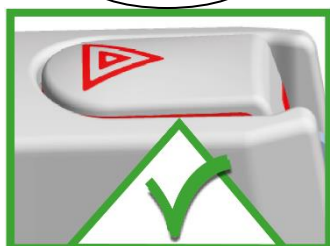

Sicurezza totale per il peso massimo utilizzatore

16



Attenzione! La maniglia deve essere staccata e riattaccata immediatamente!

L'aderenza del maniglione è ridotta.

L'utilizzo non è più consentito per il peso massimo utilizzatore. (è ancora presente una forza di presa ridotta).

9. Accessori

Per evitare che persone non autorizzate (ad es. persone affette da demenza, persone con disturbi comportamentali, bambini o in luoghi pubblici) possano aprire il maniglione, raccomandiamo la nostra serratura di sicurezza.

Codice 1400672/**ALL08 LUCCHETTI** (in dotazione 2 lucchetti, 1 chiave).

Video lucchetti di sicurezza



Una pulizia di base con il nostro speciale detergente (Numero d'ordine 1400677), aumenta l'effetto di aspirazione e permette un utilizzo a intervalli più lunghi, a seconda dell'intensità, della frequenza e dell'ambiente. Condizioni d'uso, raccomandate (ad esempio in caso di sporcizia o dopo l'uso di additivi per bagno oleosi)

Video
Pulizia



Adattatori per giunti angolari

Codice 1400558(**ALL08 556**), per l'utilizzo su angoli

Adattatori per giunti cardanici

Codice 14005 55(**ALL08 F**), per l'utilizzo su angoli in maniera flessibile

Prolunga per leva

Codice 1400573(**ALL08 PROLUNLEVA**), se la forza è troppo bassa, consente di azionare la leva con meno sforzo

Piastre adesive in acciaio inox

Codice 146141414(**ALL08 412**), per piastrelle porose o dove la superficie non è adatta al fissaggio (ad es. "mosaico")

10. Altri prodotti 11

Per esigenze di carico più elevate consigliamo il nostro QuattroPlus!

Le maniglie QuattroPlus sono progettate per un peso massimo di 160 kg.



Per ulteriori informazioni e video dei nostri prodotti www.youtube.com (SEZIONE BAGNO canale Allmobility)

Contattateci allo **0522/1753185**

Potete trovarli sul nostro sito web nell'area [www.allmobility.it/ SoluzioniVentosaMobeli.pdf](http://www.allmobility.it/SoluzioniVentosaMobeli.pdf)

Maniglia
di presa



MOBELI®

Un marchio di:



ROTH Sanitärprogramme GmbH
Kohlbergstraße 5
D-72213 Altensteig
Tel +49 (0)7453/9381-0 Fax -23
info@mobeli.de
www.mobeli.de

DISTRIBUITO in ITALIA da:

Allmobility trading srl

Via Giacomo Balla, 4
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522/1753185
info@allmobility.it
www.allmobility.it

Allmobility
ABILITÀ & MOBILITÀ